



PETUNJUK PENGGUNAAN

Three Dimension Mask MD

PANDUAN UKURAN

Ukuran S: 90 mm × 145 mm

Ukuran M: 90 mm × 175 mm

FITUR

Sangat fungsional

Filter perangkap extra halus


PFE (Efisiensi penjarangan partikel kecil berukuran 0,0001mm),
VFE (Efisiensi penjarangan untuk tetesan yang mengandung virus),
BFE (Efisiensi penjarangan untuk tetesan batuk dan bersin)

*Pengujian efisiensi filtrasi dilakukan oleh Nelson Laboratories, LLC, Amerika Serikat dan Euroflns Textile Testing Spain
(PFE: ASTM F2299, BFE: ASTM F2101-19 dan EN14683:2019, Annex B, VFE: ASTM F2101)

Filter antibakteri ekstrak katekin* alami

Menekan pertumbuhan bakteri pada permukaan filter
*Aktivitas antibakteri diuji oleh Nissenken Quality Evaluation Center (JIS L1902:2015, bakteri yang diuji: E. coli, S. aureus)

*Katekin adalah senyawa utamadari teh hijau yang dikenal dengan efek antibakteri dan antivirus.

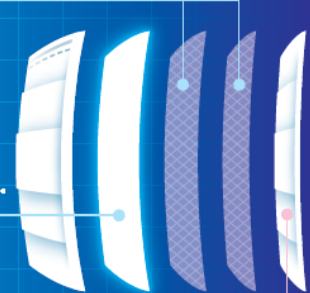

Kain bukan tenunan yang ramah kulit

Mencegah celah di sekitar hidung dan pipi

Bentuk penahan hidung yang pas dan bentuk yang pas mencegah celah dari samping

(Gambar)

Nyaman

Kenyamanan pemakaian dalam waktu lama

Pengait telinga ekstra lembut dan lebar meminimalkan sakit telinga setelah pemakaian dalam waktu lama

Bahan nonwoven yang ramah untuk kulit

Kain lembut yang nyaman di kulit Anda

Jarak yang pas disekitar mulut

Memungkinkan Anda bernapas dan berbicara dengan mudah

Bentuk batang penahan yang pas di hidung

Ruang yang cukup di sekitar mulut

Film anti kabut

Bentuk pas samping

Pengait telinga lembut yang sangat elastis

(Gambar)

INDIKASI

Perlindungan dari virus, tetesan partikel bakteri, serbuk sari dan partikel kecil



PETUNJUK PENGGUNAAN

1. Tanda "inside" harus menyentuh wajah.
2. Buka lipatannya dan buka maskernya.
3. Sesuaikan batang penahan hidung di bagian atas masker bersama dengan hidungnya.



TINDAKAN PENCEGAHAN UNTUK PENGGUNAAN

- Setelah dipakai, jangan sentuh permukaan luar masker.
- Jangan kembalikan masker yang sudah digunakan ke dalam kemasan.
- Ini adalah masker sekali pakai. Jangan dicuci dan digunakan kembali.
- Ganti dengan masker baru jika masker yang Anda gunakan kotor.
- Keluarkan dari kemasan hanya sebanyak yang Anda gunakan.
- Batang pengikat hidung terpasang di bagian atas masker.
- Jangan gunakan untuk orang yang memiliki kelainan kulit, seperti dermatitis atopik, jerawat vulgaris, kulit kasar, dll.
- Jika Anda mengalami gatal-gatal atau ruam, segera hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan dokter atau apoteker.
- Hentikan penggunaan jika Anda mengalami mual atau kesulitan bernapas. Hindari suhu dan kelembapan yang tinggi.

KONTRAINDIKASI

- Bayi dan orang yang memiliki kelainan sistem pernapasan, seperti asma, dll. tidak boleh menggunakan produk ini.
- Kacamata dapat berkabut tergantung pada lingkungan atau pengguna; gunakan dengan hati-hati.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

KEMASAN

5 buah/kemasan plastik. 30 buah/kotak

PEMILIK PRODUK

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

PABRIKAN

SAN-M PACKAGE CO., LTD.

1086-1 OJIRO, SHIMADA-CITY, SHIZUOKA, JAPAN