

PETUNJUK PENGGUNAAN

Three Dimension Mask Rose Fragrance

PANDUAN UKURAN

90 mm × 160 mm

FITUR

Three Dimension Mask

Perlindungan maksimal dari partikel tetesan Batuk & Bersin serta PM2.5

BUATAN JEPANG

Wangi Bunga mawar

Tahan Noda Makeup

Kawat hidung memastikan kesesuaian dengan bentuk hidung

Ruang yang luas di sekitar mulut

Lapisan khusus mencegah penempelan makeup

Masker 5 Lapisan dengan Filter perangkap ganda

Mikrokapsul aroma berada di dalam masker mengeluarkan harum yang tahan lama

Pengait telinga yang ekstra lembut dan sangat mudah diregangkan

INDIKASI

Perlindungan dari virus, serbuk sari dan PM 2.5

PETUNJUK PENGGUNAAN

1. Tepuk perlahan masker untuk mengaktifkan mikrokapsul aroma. Semakin kuat Anda menepuk, semakin kuat wanginya.
2. Regangkan lipatannya memanjang dan lebarkan masker sebelum digunakan.
3. Sesuaikan kawat hidung di bagian atas masker dengan hidung.

PETUNJUK PENGGUNAAN

Sisi dengan penutup harus menyentuh wajah Anda.

Terlebih dulu bengkokkan kawat hidung.

1 Tepuk perlahan masker untuk mengaktifkan mikrokapsul aroma. Semakin kuat Anda menepuk, semakin kuat wanginya.

2 Regangkan lipatannya memanjang dan lebarkan masker sebelum digunakan.

3 Sesuaikan kawat hidung di bagian atas masker dengan hidung.

PERINGATAN

- Masker sekali pakai; JANGAN mencuci dan menggunakan kembali.
- Untuk perlindungan yang lebih baik, ganti masker Anda setiap hari atau ketika menjadi basah atau kotor.
- Efek “tahan noda” mungkin tidak memuaskan tergantung pada makeup yang Anda gunakan.
- Makeup Anda masih dapat menempel jika Anda berulang kali menahan kawat hidung setelah menggunakan masker.

KEMASAN

5 masker/kemasan

PEMILIK PRODUK

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

PABRIKAN

SAN-M PACKAGE CO., LTD.

1086-1 OJIRO, SHIMADA-CITY, SHIZUOKA, JAPAN