

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khẩu trang y tế 3D MD

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Cỡ S : 90 mm × 145 mm

Cỡ M : 90 mm × 175 mm

ĐẶC TÍNH

Khẩu trang y tế 3D MD là khẩu trang có các tính năng sau:

Tính năng nổi bật

Lớp lọc cao cấp

PFE (Hiệu quả lọc các hạt nhỏ kích thước 0,0001 mm),

VFE (Hiệu quả lọc các giọt bắn chứa vi rút),

BFE (Hiệu quả lọc các giọt bắn chứa vi khuẩn)

*Hiệu quả được kiểm chứng bởi Nelson Laboratories LLC, Mỹ và Eurofins Textile Testing Spain

(PFE: ASTM F2299, BFE: ASTM F2101-19 và EN14683:2019, Phụ lục B, VFE: ASTM F2101)

Lớp lọc kháng khuẩn chứa chiết xuất catechin* tự nhiên

Ức chế sự phát triển của vi khuẩn trên bề mặt lớp lọc

*Hoạt tính kháng khuẩn được kiểm chứng bởi Nissenken Quality Evaluation Center (JIS L1902:2015, các vi khuẩn được thử nghiệm: E. coli, S. aureus)

*Catechin là một thành phần chính trong trà xanh và được biết đến với tác dụng kháng khuẩn và kháng vi rút.



Vải thân thiện với làn da

Ôm khít phần mũi và má

Thanh giữ mũi và thiết kế vừa vặn hai mặt bên giúp hạn chế khoảng hở khi sử dụng khẩu trang (Hình ảnh)

Thoải mái

Thoải mái khi đeo trong thời gian dài

Quai đeo rộng và đặc biệt mềm mại giúp giảm thiểu đau tai khi đeo trong thời gian dài

Vải không dệt thân thiện cho da

Vải mềm mại nhẹ dịu trên da

Ôm lỏng vừa vặn xung quanh miệng

Cho phép người dùng hít thở và nói chuyện dễ dàng



(Hình ảnh)

CHỈ ĐỊNH

Để bảo vệ khỏi các giọt bắn chứa vi rút, vi khuẩn và bụi mịn PM2.5.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Để mặt có chữ “inside” tiếp xúc phần mặt.
2. Tách các nếp gấp và mở khẩu trang.
3. Điều chỉnh thanh giữ ở phía trên của khẩu trang dọc theo mũi.



CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG

- Không chạm vào mặt ngoài khẩu trang sau khi đeo.
- Không để khẩu trang đã sử dụng trở lại bao bì.
- Đây là khẩu trang sử dụng một lần. Không giặt hoặc tái sử dụng. Thay mới mỗi khi thấy sản phẩm đang dùng bị bẩn.
- Chỉ lấy ra khỏi túi đựng số chiếc khẩu trang cần sử dụng.
- Thanh điều chỉnh giữ mũi được gắn vào phần trên của khẩu trang.
- Không sử dụng cho người có vấn đề bất thường trên da, ví dụ như viêm da dị ứng, mụn trứng cá, da sần sùi,...
- Nếu bị ngứa hay phát ban, lập tức ngừng sử dụng sản phẩm và tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.
- Ngưng sử dụng sản phẩm nếu cảm thấy buồn nôn hay khó thở.
- Tránh nơi có nhiệt độ và độ ẩm cao.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Trẻ sơ sinh và người có bất thường về hệ thống hô hấp, ví dụ như hen suyễn,... không nên sử dụng sản phẩm.
- Kính mắt có thể bị mờ tùy thuộc vào môi trường nhất định hoặc do người dùng; thận trọng khi sử dụng.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.

ĐÓNG GÓI

5 chiếc/gói nhựa

30 chiếc/hộp giấy

CHỦ SỞ HỮU SẢN PHẨM

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Nhật Bản