

INSTRUCCIONES DE USO


VANTELIN RESPALDO

GUÍA DE TALLAS

M : 26-34 in / 65-85 cm

L : 32-39 in / 80-100 cm

XL : 37-45 in / 95-115 cm

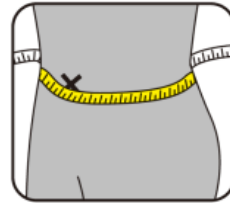

Mida su cintura a la altura del ombligo como se muestra en la imagen. Si la medida se encuentra entre dos tallas, elija la más grande.

CARACTERÍSTICAS

Un diagrama que muestra la parte inferior de la espalda y la cadera. Se ven líneas amarillas que se cruzan formando una X sobre la parte baja de la espalda, indicando la estructura de taping cruzado. Una línea roja define el contorno de la zona cubierta.	<p>Restringe la flexión hacia atrás</p> <p>La estructura incorporada de taping cruzado proporciona una amplia cobertura de la parte baja de la espalda. Limita el excesivo «movimiento hacia delante y hacia atrás» y la «torsión» excesiva que causa dolor.</p>
Un diagrama que muestra la parte inferior del abdomen y la zona lumbar. Se ven líneas rojas que indican el diseño ergonómico que sujeta firmemente la parte inferior del abdomen y la zona lumbar baja. Flechas rojas indican la dirección de la fuerza de sujeción.	<p>Ayuda a mejorar la postura</p> <p>El diseño ergonómico sujeta firmemente la parte inferior del abdomen y la zona lumbar baja para ayudar a establecer una postura saludable.</p>
	<p>Transpirabilidad mejorada</p> <p>El uso de un fino tejido transpirable mejora la ventilación para ayudarle a mantenerse fresco y seco.</p>

INDICACIÓN

Utilizar para las molestias lumbares.

INSTRUCCIONES DE USO:

Asegúrese de llevar el soporte lumbar por encima de la ropa interior.

1. Sujete el soporte lumbar con la etiqueta en el lado interior derecho (las flechas hacia arriba), y tire de él con ambas manos para que ambos lados tengan la misma longitud.
2. Tire del lado izquierdo oblicuamente hacia abajo (como guía, aprox. 5 cm/2 pulgadas por debajo del ombligo). * No lo lleves por encima del ombligo.
3. Fije la posición de la mano izquierda y tire del lado derecho oblicuamente hacia abajo para fijar el cierre de velcro.



ADVERTENCIA

- No utilizar si tiene: (1) anomalías como hinchazón y dolor intenso en la zona lesionada, incluidos hematomas y fracturas, (2) trastornos vasculares periféricos, (3) anomalías como alguna lesión, hinchazón, o sarpullido en donde se va a utilizar el producto, o (4) dermatitis crónica / alergia a textiles químicos o látex. Detenga su uso inmediatamente y consulte a su médico si experimenta síntomas como: sarpullido / enrojecimiento, picazón, erupción, congestión, dolor anormal o hinchazón.
- No lo utilice si está o puede quedarse embarazada.
- Use la talla correcta.
- No utilice mientras duerme.
- No apriete demasiado.
- No lleve la ortesis durante periodos prolongados.
- Tenga cuidado con la ropa que se pueda estropear más rápidamente con la cinta autoadherente.
- No rascar con las uñas ni tirar con fuerza.

* En el caso de que el soporte lumbar no este posicionado correctamente, es posible que no funcione según lo previsto.

* Las funciones que se obtienen con el uso del soporte pueden variar dependiendo de cada persona.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO (Cierre los cierres antes de lavar)

1. Lavar a mano por separado a menos de 40°C. No escurrir.
2. No usar blanqueador.
3. No secar a máquina.
4. Colgar y secar al aire. Evitar que reciba luz solar directamente.
5. No planchar.
6. No lavar en seco.
7. Limpieza suave en húmedo.

PRECAUCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

1. Mantener alejado del fuego o del calor excesivo.
2. Mantener fuera del alcance de los niños.
3. Guarde el cierre de gancho y bucle cerrado para que no se adhieran pelusas o similares.

PRESENTACIÓN

1 unidad.

FABRICADO POR

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN.

LUGAR DE FABRICACIÓN

Cooperativa D-M CHAIN

5-321 Osaki, Kahoku-shi, Ishikawa 929-1127 Japan