

INSTRUKSI PENGGUNAAN


Sarung Lengan KOMPRESI VANTELIN

UKURAN

S-M: 8.5in-10.5in / 21cm-27cm

M-L: 10.5in-13.5in / 27cm-34cm

Dengan siku sedikit ditekuk, ukurlah lingkaran lengan Anda 4in / 10cm di atas siku seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi.

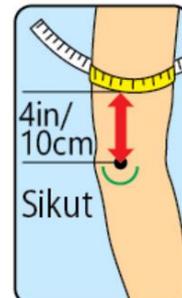

Ukuran S-M memiliki tanda (I) dan ukuran M-L memiliki tanda (II) dengan warna yang sama dengan lengan, di dalam jangkar atas.

FITUR

Fitur

Garis penahan yang searah dengan struktur otot, menghambat gerakan berlebihan yang menyebabkan kelelahan.

Memberikan tekanan yang pas dari pergelangan tangan ke lengan atas.

Bahannya sejuk, nyaman dipakai seharian

Material yang mudah menyerap meningkatkan kenyamanan dengan menyerap dan menguraikan keringat.

Mudah diregangkan dan bergerak

Dengan serat LYCRA® yang mudah meregang, mampu dipakai dalam berbagai gerakan.

Perlindungan sinar UV

INDIKASI

Mengurangi gerakan otot yang berlebihan yang menyebabkan kelelahan.

INSTRUKSI PENGGUNAAN




- Gunakan langsung mengenai kulit.
- Tangani produk dengan hati-hati agar tidak tergores kuku atau perhiasan.
- Jika produk tidak diposisikan dengan benar, produk mungkin tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- Fungsi yang diperoleh dengan memakai produk mungkin berbeda-beda, tergantung pada setiap orang.
- Warna mungkin memudar atau berubah karena keringat atau gesekan.

PERINGATAN

- Jangan gunakan jika Anda memiliki: (1) kelainan termasuk pembengkakan dan nyeri hebat akibat terkilir, patah tulang, atau cedera ligamen dll., (2) gangguan pembuluh darah perifer, (3) kelainan seperti luka, bengkak, ruam pada tempat penggunaan produk, atau (4) dermatitis kronis/alergi terhadap bahan kimia tekstil atau karet. Jika Anda mengalami gejala seperti ruam/kemerahan, gatal, erupsi, kongesti, nyeri abnormal, pembengkakan, atau mati rasa, segera hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan dokter Anda.
- Segera hentikan penggunaan produk jika Anda merasa tidak nyaman.
- Gunakan hanya sesuai petunjuk.
- Gunakan ukuran yang benar.
- Jangan gunakan saat tidur.
- Jangan memakai dua lapis.
- Dapat menyebabkan gangguan sirkulasi darah, gangguan kulit, atau gangguan saraf. Perhatikan hal-hal berikut saat mengenakannya. (1) Jangan tekuk siku terlalu erat dalam waktu lama. (2) Gunakan dan lepas produk berulang kali sesuai kebutuhan saat digunakan dalam jangka waktu yang lama.

INSTRUKSI PERAWATAN (Gunakan jaring cuci pakaian)

1. Cuci terpisah di bawah 40°C.
2. Jangan menggunakan pemutih.
3. Jangan dikeringkan dengan mesin pengering pakaian.
4. Keringkan di udara terbuka. Hindari sinar matahari langsung.
5. Setrika dengan suhu rendah. Jangan menggunakan setrika uap. Gunakan kain press. Jangan menyetrika bagian yang dicetak ("V").
6. Jangan dicuci kering.

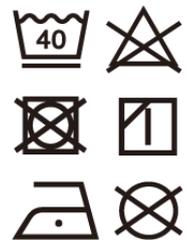

TINDAKAN PENCEGAHAN MENGENAI PENYIMPANAN DAN PENANGANAN

1. Jangan letakkan produk di dekat api dan panas.
2. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
3. Produk berisiko robek jika dikenakan dengan cara yang salah atau jika ada bagian produk yang terkena tekanan kuat.

KEMASAN

2 buah/kotak unit

Untuk lengan kanan dan kiri

PEMILIK PRODUK

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JEPANG