

INSTRUKSI PENGGUNAAN

PERGELANGAN KAKI PENYANGGA VANTELIN

UKURAN

- S : Wanita: 4.5-6.5 in / 22-24 cm
Pria: 4-6 in / 22-24 cm
- M : Wanita: 6.5-8.5 in / 24-26 cm
Pria: 6-8 in / 24-26 cm
- L : Wanita: 8.5-10.5 in / 26-28 cm
Pria: 8-10 in / 26-28 cm

Jika dua ukuran berlaku, pilih ukuran yang lebih besar.

FITUR


| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Struktur Rekatan Angka Delapan</p> <p>Rajutan jala berbentuk angka delapan yang membalut mata kaki dan telapak kaki berfungsi memberikan penyangga sendi ekstra saat berlari, berjalan dan melakukan kegiatan sehari-hari.</p> |
|  | <p>Struktur Pita Sokongan Lengkung Kaki</p> <p>Struktur pita sokongan lengkung kaki meningkatkan arka untuk membantu fungsi redaman, sekaligus mengurangi kelelahan.</p> |
|  | <p>Struktur Anchor</p> <p>Pergelangan tanpa kelim atas dan bawah mencegah penyangga terlepas dan menstabilkan struktur pita angka lapan.</p> |

INDIKASI

Gunakan untuk nyeri sendi sehari-hari.

INSTRUKSI PENGGUNAAN

1. Masukkan kaki ke dalam penyangga mata kaki dengan bagian ujung tanda “V” mengarah ke bagian bawah.
 2. Kenakan penyangga agar pas dengan pergelangan kaki Anda dan sesuaikan agar tidak kendur.
- Selalu pakai penyangga langsung pada kulit.
 - Jika penyangga tidak ditempatkan dengan benar, ada kemungkinan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- * Fungsi yang diperoleh dengan memakai penyangga bisa berbeda-beda tergantung pada tiap orang.

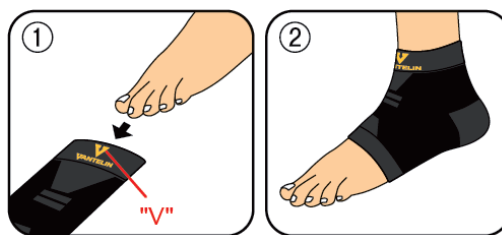

PERINGATAN

- Jangan gunakan jika Anda memiliki: (1) abnormalitas termasuk pembengkakan dan nyeri hebat karena keseleo, patah tulang, atau cedera ligamen dll., (2) gangguan pembuluh darah perifer, (3) abnormalitas seperti cedera, bengkak, ruam di tempat di mana penyangga akan dikenakan, atau (4) dermatitis kronis / alergi terhadap bahan kimia tekstil atau karet. Jika Anda mengalami gejala seperti ruam / kulit memerah, gatal, erupsi, hidung tersumbat, nyeri tidak normal, atau bengkak, segera hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan ahli kesehatan Anda.
- Gunakan sesuai petunjuk.
- Gunakan ukuran yang sesuai.
- Jangan digunakan saat tidur.

INSTRUKSI PERAWATAN (Gunakan jaring cuci pakaian)

1. Cuci terpisah di bawah 30°C.
2. Jangan menggunakan pemutih.
3. Jangan dikeringkan dengan mesin pengering pakaian.
4. Keringkan di udara terbuka. Hindari sinar matahari langsung.
5. Setrika dengan suhu rendah. Jangan menggunakan setrika uap.
6. Jangan dicuci kering.

TINDAKAN PENCEGAHAN TERKAIT PENYIMPANAN DAN PERAWATAN

1. Jangan letakkan produk di dekat api dan panas.
2. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
3. Ada risiko produk yang dikenakan robek jika dengan cara yang salah atau tekanan yang kuat diterapkan pada bagian produk.

KEMASAN

1 unit per kotak

PEMILIK PRODUK

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JEPANG

PRODUSEN

IIDA HOSIERY CO., LTD.

1619, YAMAGUCHI, KOUHOKU-MACHI, KISHIMA-GUN, SAGA-KEN

849-0501 JEPANG