


INSTRUKSI PENGGUNAAN

PUNGGUNG PENYANGGA VANTELIN


UKURAN

- M : 26-34 in / 65-85 cm
- L : 32-39 in / 80-100 cm
- XL: 37-45 in / 95-115 cm

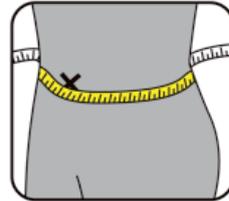

Ukur lingkaran pinggang pada pusar anda seperti gambar. Jika dua ukuran berlaku, pilih ukuran yang lebih besar.

FITUR

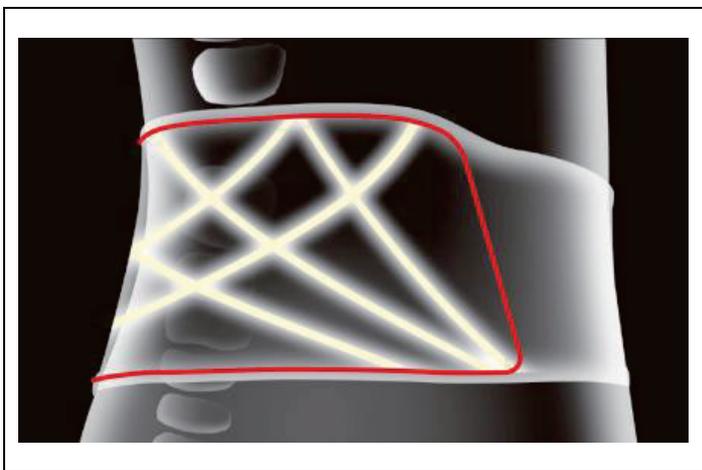	<p>Membatasi Pembengkokan ke Belakang</p> <p>Rekatan Jaring Silang terpasang memberi perlindungan yang lebih luas pada bagian belakang. Mampu membatasi mengindahkan "pergerakan ke belakang" dan "pemutaran" berlebihan yang menyebabkan rasa sakit.</p>
	<p>Membantu Memperbaiki Postur Tubuh</p> <p>Desain ergonomis untuk menyangga abdomen bawah dan bagian bawah belakang dengan kuat untuk membantu membentuk postur tubuh yang sehat.</p>
	<p>Meningkatkan Penyerapan Udara</p> <p>Penggunaan kain tipis tembus udara meningkatkan ventilasi untuk membantu Anda tetap dingin dan kering.</p>

INDIKASI

Gunakan untuk nyeri sendi sehari-hari.


PETUNJUK PENGGUNAAN:

Pastikan untuk memakai penahan di atas celana dalam Anda.

1. Pegang penahan dengan label di sisi kanan dalam (Panah harus mengarah ke atas), dan tarik dengan kedua tangan agar panjang kedua sisinya sama.
2. Tarik sisi kiri miring ke bawah (sebagai panduan, kira-kira 2 in / 5 cm bawah pusar).

*Jangan memakainya di atas pusar.

3. Tetapkan posisi tangan kiri dan tarik sisi kanan miring ke bawah untuk mengikat pengikat hook-and-loop.

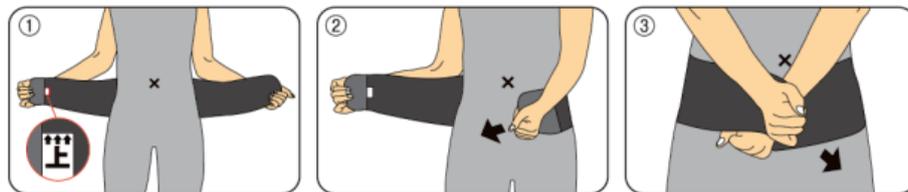

PERINGATAN

- Jangan gunakan jika Anda memiliki: (1) abnormalitas seperti bengkak dan nyeri hebat pada area cedera, termasuk memar dan patah tulang, (2) gangguan pembuluh darah perifer, (3) abnormalitas seperti cedera, bengkak, ruam di tempat di mana penyangga akan dikenakan, atau (4) dermatitis kronis / alergi terhadap bahan kimia tekstil atau karet. Jika Anda mengalami gejala seperti ruam / kulit memerah, gatal, erupsi, hidung tersumbat, nyeri tidak normal, atau bengkak, segera hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan ahli kesehatan Anda.
- Jangan digunakan jika anda sedang atau kemungkinan hamil.
- Gunakan ukuran yang sesuai. (Lihat di Ukuran)
- Jangan digunakan saat tidur
- Jangan terlalu ketat.
- Jangan memperpanjang waktu pemakaian penyangga.
- Berhati-hatilah karena pakaian dapat rusak karena terkena pengikat hook-and-loop.
- Jangan menggaruk dengan kuku Anda atau menariknya dengan kuat.
- * Jika penyangga tidak ditempatkan dengan benar, ada kemungkinan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- * Fungsi yang diperoleh dengan memakai penyangga bisa berbeda-beda tergantung pada tiap orang.

INSTRUKSI PERAWATAN (Tutup perekat sebelum dicuci)

1. Cuci terpisah di bawah 40°C. Jangan diperas.
2. Jangan menggunakan pemutih.
3. Jangan dikeringkan dengan mesin pengering pakaian.
4. Keringkan di udara terbuka. Hindari sinar matahari langsung.
5. Jangan disetrika.
6. Jangan dicuci kering.
7. Bersihkan secara basah dengan lembut.

TINDAKAN PENCEGAHAN TERKAIT PENYIMPANAN DAN PERAWATAN

1. Jangan letakkan produk di dekat api dan panas.
2. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
3. Ada risiko produk yang dikenakan robek jika dengan cara yang salah atau tekanan yang kuat diterapkan pada bagian produk.

KEMASAN

1 unit per kotak

PEMILIK PRODUK

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JEPANG

PRODUSEN

D-M CHAIN Cooperative

5-321 Osaki, Kahoku-shi, Ishikawa 929-1127 Jepang