

INSTRUKSI PENGGUNAAN

VANTELIN SUPPORT COOL FIT Ankle

UKURAN (Nukuran sepatu)

M: Wanita : 6.5-8.5 / 24-26 cm

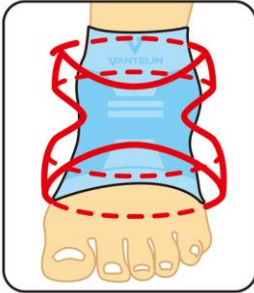
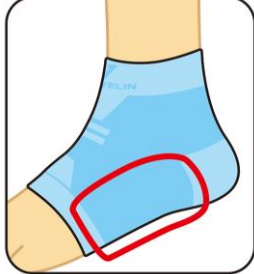

Pria : 6-8 / 24-26 cm

L : Wanita : 8.5-10.5 / 26-28 cm

Pria : 8-10 / 26-28 cm

Jika dua ukuran berlaku, pilih ukuran yang lebih besar.

FITUR

	<p>Struktur Rekatan Angka Delapan</p> <p>Rajutan jala berbentuk angka delapan yang membalut mata kaki dan telapak kaki berfungsi memberikan ekstra penyangga pada sendi saat berlari, berjalan dan melakukan kegiatan sehari-hari.</p>
	<p>Struktur Pita Sokongan Lengkung Kaki</p> <p>Struktur pita sokongan lengkung kaki menaikkan lengkungan untuk meningkatkan fungsi bantalannya, sehingga mengurangi kelelahan.</p>
	<p>Struktur Anchor</p> <p>Manset tanpa kelim bagian atas dan bawah mencegah tergelincirnya penyangga dan menstabilkan struktur pita angka delapan.</p>

INDIKASI

Gunakan sehari-hari untuk ketidaknyamanan sendi.

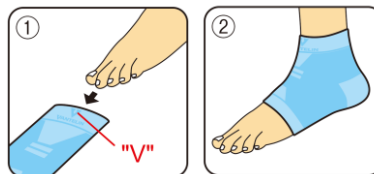
KEMASAN

Kotak berisi 1 pcs

INSTRUKSI PENGGUNAAN

1. Masukkan kaki ke dalam penyangga mata kaki dengan bagian ujung tanda “V” mengarah ke bagian bawah.
2. Meletakkan struktur pita angka delapan sekitar pergelangan kaki dan lengkung kaki anda. Ratakan penahan supaya tidak ada lipatan terkumpul.
 - Selalu pakai penyangga langsung pada kulit.
 - Jika penyangga tidak ditempatkan dengan benar, ada kemungkinan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

* Fungsi yang diperoleh dengan memakai penyangga bisa berbeda-beda tergantung pada tiap orang.



PERINGATAN

- Jangan gunakan jika Anda memiliki: (1) keseleo, patah atau cedera ligamen, (2) gangguan pembuluh darah perifer, (3) abnormalitas seperti cedera, bengkak, ruam di tempat di mana penyangga akan dikenakan, atau (4) dermatitis kronis / alergi terhadap bahan kimia tekstil atau karet. Jika anda mempunyai pengalaman seperti ini, hentikan penggunaan dan konsultasi dengan tenaga kesehatan profesional.
- Gunakan sesuai petunjuk.
- Gunakan ukuran yang sesuai.
- Jangan digunakan saat tidur.

INSTRUKSI PERAWATAN

1. Cuci tangan secara terpisah pada suhu dibawah 40°C.
2. Jangan menggunakan pemutih.
3. Jangan dikeringkan dengan mesin pengering pakaian.
4. Keringkan di udara terbuka. Hindari sinar matahari langsung.
5. Setrika dengan suhu rendah. Jangan menggunakan setrika uap.
6. Jangan dicuci kering.

TINDAKAN PENCEGAHAN TERKAIT PENYIMPANAN DAN PERAWATAN

1. Jangan letakkan produk di dekat api dan panas.
2. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
3. Ada risiko produk yang dikenakan robek jika dengan cara yang salah atau tekanan yang kuat diterapkan pada bagian produk.

PEMILIK PRODUK

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JEPANG

PRODUSEN

IIDA HOSIERY CO., LTD.

1619, YAMAGUCHI, KOUHOKU-MACHI, KISHIMA-GUN, SAGA-KEN 849-0501 JEPANG