


INSTRUKSI PENGGUNAAN

LUTUT PENYANGGA VANTELIN

UKURAN

- S : 12-13 in / 31-34 cm
- M : 13-14.5 in / 34-37 cm
- L : 14.5-16 in / 37-40 cm
- XL : 16-17 in / 40-43 cm

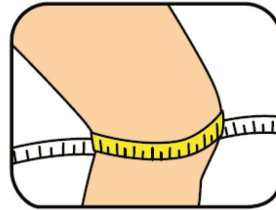

Ukur lingkar lutut seperti gambar. Jika dua ukuran berlaku, pilih ukuran yang lebih besar.

FITUR

	<p>Struktur Pita Berbentuk-U</p> <p>Struktur pita berbentuk-U menyangga lutut untuk mengurangi tekanan kepada tendon patellar saat menjulurkan lutut.</p>
	<p>Struktur Rajutan Bercelah</p> <p>Panel jala depan belakang yang tembus udara berfungsi menyediakan ventilasi dan mengurangi kerutan di belakang lutut.</p>
	<p>Struktur Jangkar</p> <p>Pergelangan atas dan bawah tanpa kelim mencegah penyangga terlepas dan menstabilkan struktur pita berbentuk-U.</p>


INDIKASI

Gunakan untuk nyeri sendi sehari-hari.

INSTRUKSI PENGGUNAAN

1. Masukkan kaki ke dalam penyangga lutut dengan ujung tanda “V” mengarah ke bawah.
2. Posisikan struktur rekat berbentuk U di bawah dan di salah satu sisi dari lutut. Ratakan penahan sehingga tidak ada tonjolan saat Anda meregangkan lutut.
 - Selalu pakai penyangga langsung pada kulit.
 - Jika penyangga tidak ditempatkan dengan benar, ada kemungkinan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

* Fungsi yang diperoleh dengan memakai penyangga bisa berbeda-beda tergantung pada tiap orang.

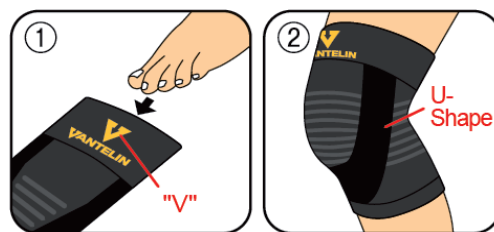

PERINGATAN

- Jangan gunakan jika Anda memiliki: (1) abnormalitas termasuk pembengkakan dan nyeri hebat karena keseleo, patah tulang, atau cedera ligamen dll., (2) gangguan pembuluh darah perifer, (3) abnormalitas seperti cedera, bengkak, ruam di tempat di mana penyangga akan dikenakan, atau (4) dermatitis kronis / alergi terhadap bahan kimia tekstil atau karet. Jika Anda mengalami gejala seperti ruam / kulit memerah, gatal, erupsi, hidung tersumbat, nyeri tidak normal, atau bengkak, segera hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan ahli kesehatan Anda.
- Gunakan sesuai petunjuk.
- Gunakan ukuran yang sesuai. (Lihat di Ukuran)
- Jangan digunakan saat tidur.

INSTRUKSI PERAWATAN (Gunakan jaring cuci pakaian)

1. Cuci terpisah di bawah 30°C.
2. Jangan menggunakan pemutih.
3. Jangan dikeringkan dengan mesin pengering pakaian.
4. Keringkan di udara terbuka. Hindari sinar matahari langsung.
5. Setrika dengan suhu rendah. Jangan menggunakan setrika uap.
6. Jangan dicuci kering.

TINDAKAN PENCEGAHAN TERKAIT PENYIMPANAN DAN PERAWATAN

1. Jangan letakkan produk di dekat api dan panas.
2. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
3. Ada risiko produk yang dikenakan robek jika dengan cara yang salah atau tekanan yang kuat diterapkan pada bagian produk.

KEMASAN

1 unit per kotak

PEMILIK PRODUK

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JEPANG

PRODUSEN

IIDA HOSIERY CO., LTD.

1619, YAMAGUCHI, KOUHOKU-MACHI, KISHIMA-GUN, SAGA-KEN

849-0501 JEPANG