

## INSTRUKSI PENGGUNAAN


### PERGELANGAN TANGAN PENYANGGA VANTELIN

#### UKURAN

S : 5.5-6 in / 13-15 cm

M : 6-6.5 in / 15-17 cm

L : 6.5-7.5 in / 17-19 cm

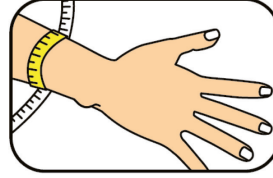

Ukur lingkaran pergelangan sekitar 3 in / 7 cm di atas pergelangan. Jika dua ukuran berlaku, pilih ukuran yang lebih besar.

#### FITUR


	<p><b>Struktur Pita Sandwic</b></p> <p>Struktur pita sandwic di bagian depan dan belakang pergelangan tangan berfungsi sebagai belat untuk membatasi pergerakan berlebihan pergelangan tangan dan mengurangi ketidaknyamanan.</p>
	<p><b>Struktur Mengunci Ibu Jari</b></p> <p>Mempertahankan kedudukan penyangga yang betul sambil membolehkan pergerakan bebas ibu jari.</p>
	<p><b>Struktur Anchor</b></p> <p>Pergelangan atas dan bawah tanpa kelim mencegah penyangga dari tergelincir dan menstabilkan struktur pita.</p>

## INDIKASI

Gunakan untuk nyeri sendi sehari-hari.

## INSTRUKSI PENGGUNAAN

1. Masukkan tangan ke dalam penyangga dengan bagian ujung tanda "V" mengarah ke bawah dan jari jempol dijulurkan ke luar lubang jempol (posisi yang sama untuk tangan kiri maupun kanan).
  2. Rapihan penyangga tersebut dan pastikan bagian jaring rajutan lurus dan terpusat pada bagian atas dan bawah pergelangan tangan. Selalu kenakan penyangga langsung di kulit. Berhati-hatilah untuk tidak terlalu meregangkan penyangga karena hal itu dapat membuat tegang pangkal ibu jari Anda.
- Selalu pakai penyangga langsung pada kulit.
  - Jika penyangga tidak ditempatkan dengan benar, ada kemungkinan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- \* Fungsi yang diperoleh dengan memakai penyangga bisa berbeda-beda tergantung pada tiap orang.

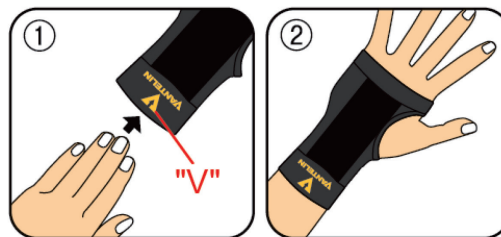

## PERINGATAN

- Jangan gunakan jika Anda memiliki: (1) abnormalitas termasuk pembengkakan dan nyeri hebat karena keseleo, patah tulang, atau cedera ligamen dll., (2) gangguan pembuluh darah perifer, (3) abnormalitas seperti cedera, bengkak, ruam di tempat di mana penyangga akan dikenakan, atau (4) dermatitis kronis / alergi terhadap bahan kimia tekstil atau karet. Jika Anda mengalami gejala seperti ruam / kulit memerah, gatal, erupsi, hidung tersumbat, nyeri tidak normal, atau bengkak, segera hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan ahli kesehatan Anda.
- Gunakan sesuai petunjuk.
- Gunakan ukuran yang sesuai.
- Jangan digunakan saat tidur.

**INSTRUKSI PERAWATAN (Gunakan jaring cuci pakaian)**

1. Cuci terpisah di bawah 30°C.
2. Jangan menggunakan pemutih.
3. Jangan dikeringkan dengan mesin pengering pakaian.
4. Keringkan di udara terbuka. Hindari sinar matahari langsung.
5. Setrika dengan suhu rendah. Jangan menggunakan setrika uap.
6. Jangan dicuci kerin.

**KEMASAN**

1 unit per kotak

**TINDAKAN PENCEGAHAN TERKAIT PENYIMPANAN DAN PERAWATAN**

1. Jangan letakkan produk di dekat api dan panas.
2. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
3. Ada risiko produk yang dikenakan robek jika dengan cara yang salah atau tekanan yang kuat diterapkan pada bagian produk.

**PEMILIK PRODUK**

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JEPANG

**PRODUSEN**

IIDA HOSIERY CO., LTD.

1619, YAMAGUCHI, KOUHOKU-MACHI, KISHIMA-GUN, SAGA-KEN

849-0501 JEPANG