

MANUAL ARAHAN
SOKONGAN BUKU LALI VANTELIN

PANDUAN SAIZ (Saiz Kasut)

S: Wanita: 4.5-6.5 in / 22-24 cm

Lelaki: 4-6 in / 22-24 cm

M: Wanita: 6.5-8.5 in / 24-26 cm

Lelaki: 6-8 in / 24-26 cm

L: Wanita: 8.5-10.5 in / 26-28 cm

Lelaki: 8-10 in / 26-28 cm

Jika muat dua saiz, pilih yang lebih besar.

FUNGSI


	<p>Struktur Pita Angka Lapan</p> <p>Mesh kait angka lipan diikat di bahagian buku lali dan kaki untuk memberi sokongan tambahan sendi apabila berjalan dan melakukan aktiviti harian.</p>
	<p>Struktur Pita Sokongan Lengkung Kaki</p> <p>Struktur pita sokongan lengkung kaki meningkatkan arka untuk membantu fungsi redaman, sekaligus mengurangkan keletihan.</p>
	<p>Struktur Penambat</p> <p>Pergelangan tanpa kelim atas dan bawah mencegah sokongan daripada tergelincir dan menstabilkan struktur pita angka lapan.</p>

INDIKASI

Digunakan untuk ketidakselesaan sendi setiap hari.

MANUAL ARAHAN

1. Masukkan kaki ke dalam pergelangan sokongan dengan bahagian bawah "V" menunjuk ke arah bawah.
 2. Pakai sokongan supaya ia tersuai dengan pergelangan kaki anda dan menyesuaikannya supaya tidak longgar.
 - Sentiasa memakai sokongan terus pada kulit.
 - Jika sokongan tidak diletakkan dengan betul, ia tidak dapat berfungsi seperti yang sepatutnya.
- * Keberkesanan yang diperolehi dengan memakai sokongan mungkin berbeza antara individu.

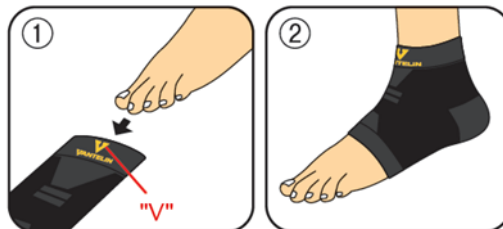

AMARAN

- Jangan guna sekiranya anda mempunyai: (1) keabnormalan termasuk bengkak dan mengalami kesakitan yang kuat disebabkan terseluh, patah tulang, atau kecederaan ligamen dan lain-lain., (2) atau mungkin mengalami gangguan vaskular perifer (3) keabnormalan seperti kecederaan, bengkak, ruam pada bahagian di mana sokongan harus dipakai, atau (4) dermatitis kronik / alergi terhadap tekstil kimia atau getah. Sekiranya anda mengalami simptom seperti ruam / kemerahan, gatal, letusan, kongesti, kesakitan yang luar biasa, atau bengkak, sila berhenti menggunakan penyokong dengan segera dan runding dengan pakar kesihatan profesional anda.
- Gunakan hanya seperti yang diarahkan.
- Gunakan saiz yang betul.
- Jangan gunakan ketika tidur.

ARAHAN PENJAGAAN (MENGGUNAKAN BERSIH PAKAIAN)

1. Basuh berasingan di bawah suhu 30°C.
2. Jangan gunakan peluntur.
3. Jangan keringkan menggunakan mesin basuh.
4. Menggantungkan dan udara kering. Elakkan dari cahaya matahari langsung.
5. Seterika pada suhu rendah. Jangan menyeterika dengan stim.
6. Dilarang cucian kering.

LANGKAH WASPADA BERKAITAN PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN

1. Jangan letak produk berdekatan dengan api dan haba.
2. Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.
3. Terdapat risiko produk terkoyak apabila memakai secara salah atau mengenakan daya yang kuat ke atasnya.

PEMBUNGKUSAN

Kotak 1 unit.

PEMILIK PRODUK

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Jepun

DIBUAT OLEH

IIDA HOSIERY CO., LTD.

1619, Yamaguchi, Kouhoku-machi, Kishima-gun, Saga-Ken 849-0501 Jepun