

# MANUAL ARAHAN


## SOKONGAN SIKU VANTELIN

### PANDUAN SAIZ

S: 7.5-9 in / 19-22 cm

M: 9-10 in / 22-25 cm

L: 10-11 in / 25-28 cm

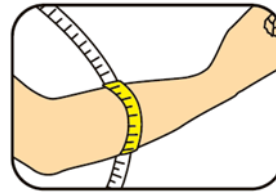

Ukur di sekitar lengan seperti ditunjukkan. Jika muat dua saiz, pilih saiz yang lebih besar.

### FUNGSI

	<p><b>Struktur Pita Berbentuk X</b></p> <p>Struktur pita berbentuk X di dalam siku menghadkan pergerakan berlebihan dan mengurangkan ketidakselesaan apabila mengangkat objek berat.</p>
	<p><b>Panel Mesh Ventilasi</b></p> <p>Struktur mesh dikait yang terletak di bahagian luar siku membolehkan sokongan untuk bersesuaian dengan pergerakan siku.</p>
	<p><b>Struktur Penambat</b></p> <p>Pergelangan atas dan bawah tanpa kelim menghalang sokongan daripada tergelincir dan menstabilkan struktur pita berbentuk X.</p>

### INDIKASI


Digunakan untuk ketidakselesaan sendi setiap hari.

## MANUAL ARAHAN

1. Luncurkan lengan ke dalam kurungan siku dengan bahagian bawah "V" menunjuk ke bawah.
2. Letakkan mesh kait berbentuk X pada bahagian dalam siku, dengan pusat X bersambung dengan bengkok siku.

Melicinkan pendakap supaya tiada gumpalan apabila anda membengkokkan siku.

- Sentiasa memakai sokongan terus pada kulit.
  - Jika sokongan tidak dipakai dengan betul, ia tidak dapat berfungsi seperti yang sepatutnya.
- \* Keberkesanan yang diperolehi dengan memakai sokongan mungkin berbeza antara individu.

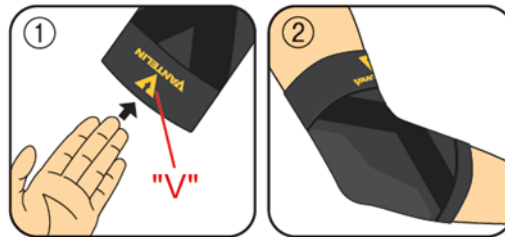

## AMARAN

- Jangan guna sekiranya anda mempunyai: (1) keabnormalan termasuk bengkak dan mengalami kesakitan yang kuat disebabkan terseluh, patah tulang, atau kecederaan ligamen dan lain-lain., (2) atau mungkin mengalami gangguan vaskular periferai (3) keabnormalan seperti kecederaan, bengkak, ruam pada bahagian di mana sokongan harus dipakai, atau (4) dermatitis kronik / alergi terhadap tekstil kimia atau getah. Sekiranya anda mengalami simptom seperti ruam / kemerahan, gatal, letusan, kongesti, kesakitan yang luar biasa, atau bengkak, sila berhenti menggunakan penyokong dengan segera dan runding dengan pakar kesihatan professional anda.
- Gunakan hanya seperti yang diarahkan.
- Gunakan saiz yang betul.
- Jangan gunakan ketika tidur.

## ARAHAN PENJAGAAN (MENGUNAKAN BERSIH PAKAIAN)

1. Basuh berasingan di bawah suhu 30°C.
2. Jangan gunakan peluntur.
3. Jangan keringkan menggunakan mesin basuh.
4. Menggantungkan dan udara kering. Elakkan cahaya matahari langsung.
5. Seterika pada suhu rendah. Jangan menyeterika dengan stim.
6. Dilarang cucian kering.

## **LANGKAH WASPADA BERKAITAN PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN**

1. Jangan letak produk berdekatan dengan api dan haba.
2. Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.
3. Terdapat risiko produk terkoyak apabila memakai secara salah atau mengenakan daya yang kuat ke atasnya.

## **PEMBUNGKUSAN**

Kotak 1 unit.

## **PEMILIK PRODUK**

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Jepun

## **DIBUAT OLEH**

IIDA HOSIERY CO., LTD.

1619, Yamaguchi, Kouhoku-machi, Kishima-gun, Saga-Ken 849-0501 Jepun