

MANUAL ARAHAN
SOKONGAN LUTUT VANTELIN


PANDUAN SAIZ

S: 12-13 in / 31-34 cm

M: 13-14.5 in / 34-37 cm

L: 14.5-16 in / 37-40 cm

XL: 16-17 in / 40-43 cm

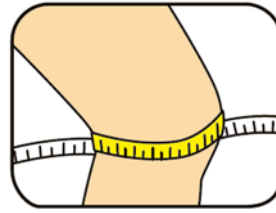

Ukur keliling lutut seperti yang ditunjukkan. Jika muat dua saiz, pilih yang lebih besar.

FUNGSI

	<p>Struktur Pita Berbentuk-U</p> <p>Struktur pita berbentuk-U menyokong lutut untuk mengurangkan tekanan kepada tendon patellar semasa lanjutan</p>
	<p>Struktur Belahan Kait</p> <p>Panel mesh belakang dan hadapan yang telap udara memberi pengudaraan dan mengurangkan lipatan di belakang lutut</p>
	<p>Struktur Penambat</p> <p>Pergelangan atas dan bawah tanpa kelim mengelakkan sokongan daripada tergelincir dan menstabilkan struktur pita berbentuk-U</p>

INDIKASI

Digunakan untuk ketidakselesaan sendi setiap hari.


MANUAL ARAHAN

1. Masukkan kaki dalam pendakap lutut dengan bahagian bawah "V" menghala ke bawah.
2. Letakkan struktur U pita berbentuk-U di bawah dan pada salah satu bahagian lutut.

Melicinkan pendakap supaya tiada gumpalan apabila anda meregangkan lutut.

- Sentiasa memakai sokongan terus pada kulit.
- Jika sokongan tidak dipakai dengan betul, ia tidak dapat berfungsi seperti yang sepatutnya.

* Keberkesanan yang diperoleh dengan memakai sokongan mungkin berbeza antara individu.

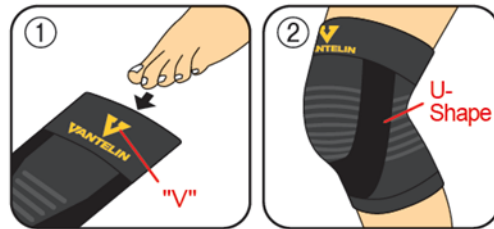

AMARAN

- Jangan guna sekiranya anda mempunyai: (1) keabnormalan termasuk bengkak dan mengalami kesakitan yang kuat disebabkan terseliuh, patah tulang, atau kecederaan ligamen dan lain-lain., (2) atau mungkin mengalami gangguan vaskular periferai (3) keabnormalan seperti kecederaan, bengkak, ruam pada bahagian di mana sokongan harus dipakai, atau (4) dermatitis kronik / alergi terhadap tekstil kimia atau getah. Sekiranya anda mengalami simptom seperti ruam / kemerahan, gatal, letusan, kongesti, kesakitan yang luar biasa, atau bengkak, sila berhenti menggunakan penyokong dengan segera dan runding dengan pakar kesihatan professional anda.
- Gunakan hanya seperti yang diarahkan.
- Gunakan saiz yang betul.
- Jangan gunakan ketika tidur.

ARAHAN PENJAGAAN (MENGGUNAKAN BERSIH PAKAIAN)

1. Basuh berasingan di bawah suhu 30°C.
2. Jangan gunakan peluntur.
3. Jangan keringkan menggunakan mesin basuh.
4. Menggantungkan dan udara kering. Elakkan cahaya matahari langsung.
5. Seterika pada suhu rendah. Jangan menyeterika dengan stim.
6. Dilarang cucian kering.

LANGKAH WASPADA BERKAITAN PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN

1. Jangan letak produk berdekatan dengan api dan haba.
2. Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.
3. Terdapat risiko produk terkoyak apabila memakai secara salah atau mengenakan daya yang kuat ke atasnya.

PEMBUNGKUSAN

Kotak 1 unit.

PEMILIK PRODUK

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Jepun

DIBUAT OLEH

IIDA HOSIERY CO., LTD.

1619, Yamaguchi, Kouhoku-machi, Kishima-gun, Saga-Ken 849-0501 Jepun