

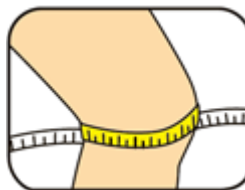
MANUAL ARAHAN

SOKONGAN Lutut VANTELIN COOL FIT (Biru Muda)

PANDUAN SAIZ:



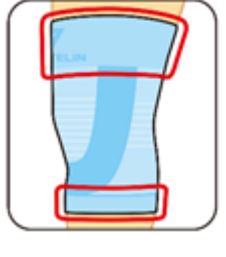
M: 13in-14.5in / 34cm-37cm

L: 14.5in-16in / 37cm-40cm



Ukur keliling lutut seperti yang ditunjukkan. Jika muat dua saiz, pilih yang lebih besar.

FUNGSI

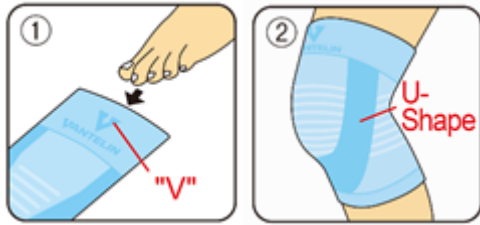
	<p>Struktur Pita Berbentuk-U</p> <p>Struktur pita berbentuk-U menyokong lutut untuk mengurangkan tekanan kepada tendon patellar semasa lanjutan</p>
	<p>Struktur Belahan Kait</p> <p>Panel mesh belakang dan hadapan yang telap udara memberi pengudaraan dan mengurangkan lipatan di belakang lutut</p>
	<p>Struktur Anchor</p> <p>Pergelangan atas dan bawah tanpa kelim mengelakkan sokongan daripada tergelincir dan menstabilkan struktur pita berbentuk-U</p>

INDIKASI

Digunakan untuk ketidakselesaan sendi setiap hari.

MANUAL ARAHAN

1. Masukkan kaki dalam pendakap lutut dengan bahagian bawah "V" menghala ke bawah.
2. Letakkan struktur U pita berbentuk-U di bawah dan pada salah satu bahagian lutut.
3. Kemaskan pendakap yang sehingga tidak ada lipatab jika anda bengkokkan lutut anda. Sentiasa memakai sokongan terus pada kulit. Jika sokongan tidak dipakai dengan betul, ia tidak dapat berfungsi seperti yang sepatutnya.



AMARAN

- Jangan gunakan jika anda: (1) terseliuh, patah atau kecederaan ligamen, (2) penyakit vaskular perifer, (3) kelainan seperti kecederaan, lebam, ruam di kawasan di mana sokongan dipakai, atau (4) kronik dermatitis / alahan kepada kimia tekstil atau getah
Sekiranya anda mempunyai sebarang pengalaman ini, hentikan penggunaan dengan serta-merta dan berunding dengan pembekal penjagaan kesihatan anda.
- Gunakan hanya seperti yang diarahkan.
- Gunakan saiz yang betul.
- Jangan gunakan ketika tidur.

ARAHAN PENJAGAAN

1. Cucian tangan berasingan di bawah suhu 40 °C.
2. Jangan gunakan peluntur.
3. Jangan keringkan menggunakan mesin basuh.
4. Menggantung dan udara kering. Elakkan cahaya matahari langsung.
5. Seterika pada suhu rendah. Jangan menyeterika dengan stim.
6. Dilarang cucian kering.

Langkah waspada berkaitan penyimpanan and penggunaan

1. Jangan letak produk berdekatan dengan api dan haba.
2. Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.
3. Terdapat risiko produk terkoyak apabila memakai secara salah atau mengenakan daya yang kuat ke atasnya.

PEMBUNGKUSAN

Kotak 1 unit.

PEMILIK PRODUK

KOWA COMPANY, LTD

4-14, 3-chome, Nihonbashi-Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8433, Jepun

DIBUAT OLEH

IIDA HOSIERY CO., LTD.

1619, Yamaguchi, Kouhoku-machi, Kishima-gun, Saga-Ken 849-0501 Jepun