


**ARAHAN PENGGUNAAN**  
**VANTELIN SUPPORT THUMB ARMOR**  
**VANTELIN PENYOKONG IBU JARI**

**PANDUAN SAIZ**

S-M: 17-19 cm

M-L: 19-21 cm

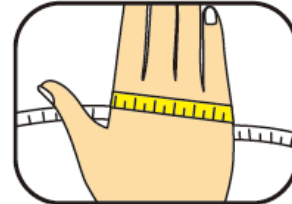

Ukur disekeliling belakang tangan anda (cm) dengan memanjangkan jari anda seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi. Jika ia jatuh antara dua saiz, pilih saiz yang lebih besar.

**FUNGSI**

	<p><b>Struktur Pita Berbentuk-Y</b></p> <p>Struktur Pita Berbentuk-Y disekeliling ibu jari dapat mengurangkan pergerakan ibu jari yang berlebihan, mengurangkan rasa sakit pada ibu jari.</p>
	<p><b>Struktur Pita Sandwic</b></p> <p>Struktur Pita Sandwic bersebelahan ibu jari dan jari kelingking menghadkan pergerakan ke kanan dan kiri pergelangan tangan yang berlebihan, mengurangkan ketidakselesaan di bahagian bawah ibu jari dan pergelangan tangan.</p>
	<p><b>Struktur Penambat</b></p> <p>Pergelangan diatas dan dibawah tanpa kelim mengelakkan sokongan daripada tergelincir dan menstabilkan struktur pita.</p>

**INDIKASI**

Digunakan untuk ketidakselesaan sendi setiap hari.

## ARAHAN PENGGUNAAN

1. Masukkan tangan: Masukkan ibu jari anda ke dalam lubang yang lebih kecil seperti ditunjukkan dalam ilustrasi.
  2. Betulkan lokasi ibu jari anda supaya ia terletak di tengah-tengah struktur pita berbentuk-Y tanpa mengendur.
    - Berhati-hati supaya kuku anda tidak tersangkut. Sarungkan terus pada kulit.
    - Jika sokongan tidak diletakkan dengan betul, ia mungkin tidak berfungsi seperti yang diharapkan.
- \* Keberkesanan yang diperoleh dengan memakai sokongan mungkin berbeza antara individu.



Tanda "V" terletak di belakang tangan anda apabila dipakai di tangan kanan anda dan terletak di tapak tangan apabila dipakai di tangan kiri.

## AMARAN

- Jangan guna sekiranya anda mempunyai: (1) keabnormalan termasuk bengkak dan mengalami kesakitan yang kuat disebabkan terseliuh, patah tulang, atau kecederaan ligamen dan lain-lain., (2) atau mungkin mengalami gangguan vaskular periferai (3) keabnormalan seperti kecederaan, bengkak, ruam pada bahagian di mana sokongan harus dipakai, atau (4) dermatitis kronik / alergi terhadap tekstil kimia atau getah. Sekiranya anda mengalami simptom seperti ruam / kemerahan, gatal, letusan, kongesti, kesakitan yang luar biasa, atau bengkak, sila berhenti menggunakan penyokong dengan segera dan runding dengan pakar kesihatan profesional anda.
- Gunakan hanya seperti yang diarahkan.
- Gunakan saiz yang betul.
- Jangan gunakan ketika tidur.

## ARAHAN PENJAGAAN (Menggunakan jaring basuh dobi)

1. Basuh berasingan di bawah suhu 30°C.
2. Jangan gunakan peluntur.
3. Jangan keringkan menggunakan mesin basuh.
4. Menggantungkan dan udara kering. Elakkan cahaya matahari langsung.
5. Seterika pada suhu rendah. Jangan menyeterika dengan stim.
6. Dilarang cucian kering.



## **LANGKAH WASPADA BERKAITAN PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN**

1. Jangan letak produk berdekatan dengan api dan haba.
2. Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.
3. Terdapat risiko produk terkoyak apabila memakai secara salah atau mengenakan daya yang kuat ke atasnya.

## **PEMBUNGKUSAN**

Kotak 1 unit.

## **PEMILIK PRODUK**

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Jepun