

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
ĐAI BẢO VỆ CỔ CHÂN VANTELIN
VANTELIN SUPPORT ANKLE

HƯỚNG DẪN CHỌN CỖ (Cỡ giày)

S: Nữ: 4,5-6,5 / 22-24 cm

Nam: 4-6 / 22-24 cm

M: Nữ: 6,5-8,5 / 24-26 cm

Nam: 6-8 / 24-26 cm

L: Nữ: 8,5-10,5 / 26-28 cm

Nam: 8-10 / 26-28 cm

Nếu có hai cỡ phù hợp thì chọn cỡ lớn hơn.

ĐẶC TÍNH


| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Cấu trúc quần hình số 8</p> <p>Vải lưới dệt kim hình số 8 bao xung quanh cổ chân và bàn chân để hỗ trợ khớp khi chạy, đi bộ và thực hiện các hoạt động hàng ngày.</p> |
|  | <p>Cấu trúc quần hỗ trợ vòm bàn chân</p> <p>Cấu trúc quần hỗ trợ vòm bàn chân giúp nâng cao vòm bàn chân để tăng cường chức năng đệm của nó, nhờ đó làm giảm sự mệt mỏi.</p> |
|  | <p>Cấu trúc bím chặt</p> <p>Bo trên và dưới liên mạch để ngăn sản phẩm bị trượt và ổn định cấu trúc quần hình số 8.</p> |

CHỈ ĐỊNH

Sử dụng hàng ngày khi bị đau hay khó chịu ở khớp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Luôn chân vào sản phẩm sao cho phần đáy chữ “V” hướng xuống dưới.
2. Điều chỉnh để đai hỗ trợ khít với cổ chân và không bị lỏng.
 - Luôn đeo đai trực tiếp lên da.
 - Nếu đai không được đeo đúng vị trí, nó có thể không mang lại tác dụng như dự kiến.
 - * Hiệu quả thu được từ việc đeo đai hỗ trợ có thể khác nhau tùy thuộc vào người sử dụng.

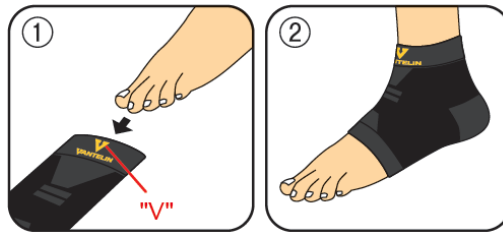

CẢNH BÁO

- Không sử dụng trong trường hợp: (1) có các bất thường bao gồm sưng, đau mạnh do bong gân, gãy xương, chấn thương dây chằng, v.v... (2) rối loạn mạch máu ngoại biên, (3) các trường hợp bất thường như bị thương, sưng tấy, nổi đỏ tại vị trí đeo đai, hoặc (4) viêm da mãn tính/dị ứng với sợi hóa học hoặc cao su. Nếu bạn có biểu hiện phát ban / mẩn đỏ, ngứa, nổi mụn, xung huyết, đau bất thường, hoặc sưng tấy, dừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức và tham vấn ý kiến chuyên môn của nhân viên y tế.
- Chỉ sử dụng theo hướng dẫn.
- Sử dụng đúng kích cỡ.
- Không đeo đai khi ngủ.

HƯỚNG DẪN VỆ SINH THIẾT BỊ (Sử dụng túi giặt)

1. Giặt riêng ở nhiệt độ 30°C.
2. Không tẩy trắng.
3. Không sấy khô.
4. Treo và để khô tự nhiên. Tránh ánh nắng trực tiếp.
5. Ủ ở nhiệt độ thấp. Không ủi hơi nước.
6. Không giặt khô.

LƯU Ý VỀ BẢO QUẢN VÀ XỬ LÝ SẢN PHẨM

1. Không để sản phẩm gần nguồn lửa và nguồn nhiệt.
2. Để xa tầm tay trẻ em.
3. Sản phẩm có thể bị rách nếu đeo không đúng cách hay tác động lực mạnh lên các phần của sản phẩm.

ĐÓNG GÓI

Hộp 1 cái

CHỦ SỞ HỮU SẢN PHẨM

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, NHẬT BẢN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

IIDA HOSIERY CO., LTD.

1619, YAMAGUCHI, KOUHOKU-MACHI, KISHIMA-GUN, SAGA-KEN 849-0501 NHẬT BẢN

THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ BẢO HÀNH

Tên cơ sở: Công ty TNHH DKSH Việt Nam

Địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty TNHH DKSH Việt Nam, Tòa nhà Viettel Complex, 285 Cách mạng Tháng tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3812 5848