


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
ĐAI BẢO VỆ ĐẦU GỐI VANTELIN COOL FIT
VANTELIN SUPPORT COOL FIT Knee

HƯỚNG DẪN CHỌN CỖ



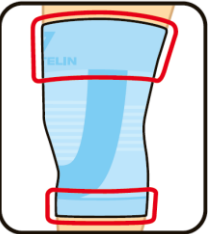
M: 13-14,5 in / 34-37 cm

L : 14,5-16 in / 37-40 cm

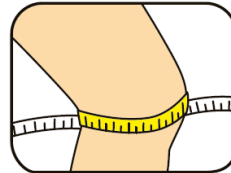

Đo xung quanh đầu gối như hình vẽ. Nếu có 2 cỡ phù hợp thì chọn cỡ lớn hơn.

ĐẶC TÍNH

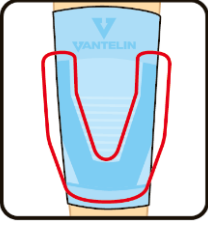	<p>Cấu trúc quần hình chữ U</p> <p>Cấu trúc quần hình chữ U hỗ trợ xương bánh chè để giảm áp lực lên gân bánh chè khi mở rộng đầu gối.</p>
	<p>Cấu trúc đan khe</p> <p>Tấm lưới thoáng khí mặt trước và mặt sau có tác dụng thông hơi và giảm co chụm phía sau đầu gối.</p>
	<p>Cấu trúc bám chặt</p> <p>Bo trên và dưới liền mạch để ngăn sản phẩm bị trượt và ổn định cấu trúc quần hình chữ U.</p>

CHỈ ĐỊNH


Sử dụng hàng ngày khi bị khó chịu ở khớp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Luồn chân vào sản phẩm sao cho phần đáy chữ “V” hướng xuống dưới.
2. Cố định lại cấu trúc quần hình chữ U như hình bên dưới ở cả hai bên đầu gối.

Vuốt lại đai để tránh bị co chum khi gấp đầu gối.

- Luôn đeo đai trực tiếp lên da.
- Nếu đai không được đeo đúng vị trí thì có thể sẽ không mang lại tác dụng như dự kiến.
- * Hiệu quả thu được từ việc đeo đai hỗ trợ có thể khác nhau tùy thuộc vào người sử dụng.

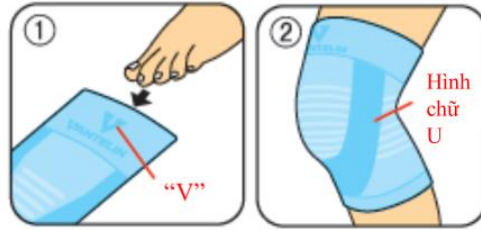

CẢNH BÁO

- Không sử dụng trong trường hợp: (1) bong gân, gãy xương, chấn thương dây chằng, v.v... (2) rối loạn mạch máu ngoại biên, (3) các trường hợp bất thường như bị thương, sưng tấy, nổi đỏ tại vị trí đeo đai, hoặc (4) viêm da mãn tính / dị ứng với sợi hóa học hoặc cao su. Nếu gặp phải bất kỳ một trong các trường hợp trên, dừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức và tham vấn ý kiến chuyên môn của nhân viên y tế.
- Chỉ sử dụng theo hướng dẫn.
- Sử dụng đúng kích cỡ.
- Không đeo đai khi ngủ.

HƯỚNG DẪN VỆ SINH THIẾT BỊ

1. Giặt tay riêng ở nhiệt độ dưới 40°C.
2. Không tẩy trắng.
3. Không sấy khô.
4. Treo và để khô tự nhiên. Tránh ánh nắng trực tiếp.
5. Ủi ở nhiệt độ thấp. Không ủi hơi nước.
6. Không giặt khô.

LƯU Ý VỀ BẢO QUẢN VÀ XỬ LÝ SẢN PHẨM

1. Không để sản phẩm gần nguồn lửa và nguồn nhiệt.
2. Để xa tầm tay trẻ em.
3. Sản phẩm có thể bị rách nếu đeo không đúng cách hay tác động lực mạnh lên các phần của sản phẩm.

ĐÓNG GÓI

Hộp 1 cái

CHỦ SỞ HỮU SẢN PHẨM

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, NHẬT BẢN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

IIDA HOSIERY CO., LTD.

1619, YAMAGUCHI, KOUHOKU-MACHI, KISHIMA-GUN, SAGA-KEN 849-0501 NHẬT BẢN

THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ BẢO HÀNH

Tên cơ sở: Công ty TNHH DKSH Việt Nam

Địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty TNHH DKSH Việt Nam, Tầng 5, Tòa nhà Viettel Complex, 285
Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 3812 5848