


**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**  
**ĐAI BẢO VỆ NGÓN TAY CÁI VANTELIN**  
**VANTELIN SUPPORT THUMB ARMOR**

**HƯỚNG DẪN CHỌN CỠ**

S-M: 17-19 cm


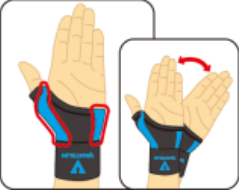

M-L: 19-21 cm

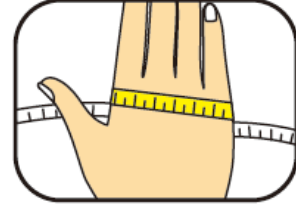

Đo vòng quanh mu bàn tay (cm) với ngón cái duỗi ra như hình minh họa.

Nếu có hai cỡ phù hợp thì chọn cỡ lớn hơn.

**ĐẶC TÍNH**


	<p><b>Cấu trúc quần dạng chữ Y</b></p> <p>Cấu trúc quần dạng chữ Y bao xung quanh ngón tay cái ngăn ngừa ngón tay cái cử động quá mức và giảm bớt khó chịu ở ngón tay cái.</p>
	<p><b>Cấu trúc quần kiểu bánh mì kẹp</b></p> <p>Cấu trúc quần kiểu bánh mì kẹp ở ngón tay cái và ngón út giúp ngăn ngừa cử động sang trái-phải quá mức của cổ tay, giảm bớt khó chịu ở phần dưới ngón tay cái và cổ tay.</p>
	<p><b>Cấu trúc bám chặt</b></p> <p>Bo trên và dưới liền mạch để ngăn sản phẩm bị trượt và ổn định các cấu trúc quần.</p>

**CHỈ ĐỊNH**

Sử dụng hàng ngày khi bị đau hay khó chịu ở khớp.

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Luồn tay vào sản phẩm: Đưa ngón tay cái vào lỗ nhỏ hơn như hình minh họa.
2. Điều chỉnh vị trí ngón tay cái vào chính giữa phần cấu trúc quần dạng chữ Y mà không để bị nhẵn.
  - Lưu ý không để móng tay vướng vào đai. Đeo trực tiếp lên da.
  - Nếu đai không được đeo đúng vị trí, nó có thể không mang lại tác dụng như dự kiến.
  - \* Hiệu quả thu được từ việc đeo đai hỗ trợ có thể khác nhau tùy thuộc vào người sử dụng.

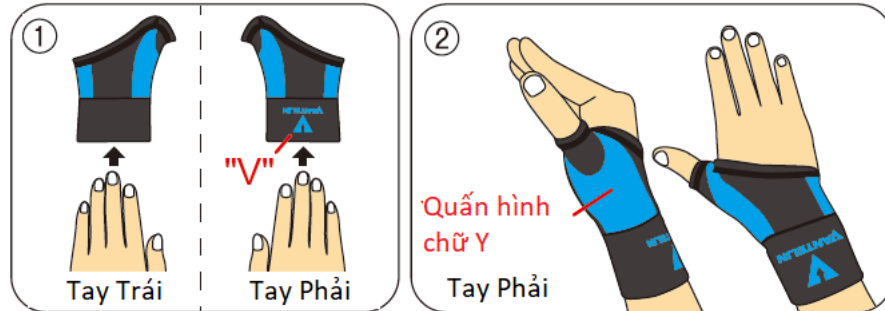

Ký hiệu “V” nằm trên mu bàn tay khi đai được đeo ở tay phải và nằm trên lòng bàn tay khi đeo ở tay trái.

## CẢNH BÁO

- Không sử dụng trong trường hợp: (1) có các bất thường bao gồm sưng, đau mạnh do bong gân, gãy xương, chấn thương dây chằng, v.v... (2) rối loạn mạch máu ngoại biên, (3) các trường hợp bất thường như bị thương, sưng tấy, nổi đỏ tại vị trí đeo đai, hoặc (4) viêm da mãn tính/dị ứng với sợi hóa học hoặc cao su. Nếu bạn có biểu hiện phát ban / mẩn đỏ, ngứa, nổi mụn, xung huyết, đau bất thường, hoặc sưng tấy, dừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức và tham vấn ý kiến chuyên môn của nhân viên y tế.
- Chỉ sử dụng theo hướng dẫn.
- Sử dụng đúng kích cỡ.
- Không đeo đai khi ngủ.

## HƯỚNG DẪN VỆ SINH THIẾT BỊ (Sử dụng túi giặt)

1. Giặt riêng ở nhiệt độ dưới 30°C.
2. Không tẩy trắng.
3. Không sấy khô.
4. Treo và để khô tự nhiên. Tránh ánh nắng trực tiếp.
5. Ủ ở nhiệt độ thấp. Không ủi hơi nước.
6. Không giặt khô.



## LƯU Ý VỀ BẢO QUẢN VÀ XỬ LÝ SẢN PHẨM

1. Không để sản phẩm gần nguồn lửa và nguồn nhiệt.
2. Để xa tầm tay trẻ em.
3. Sản phẩm có thể bị rách nếu đeo không đúng cách hay tác động lực mạnh lên các phần của sản phẩm.

## **ĐÓNG GÓI**

Hộp 1 cái

## **CHỦ SỞ HỮU SẢN PHẨM**

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, NHẬT BẢN

## **THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ BẢO HÀNH**

Tên cơ sở: Công ty TNHH DKSH Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà Viettel Complex, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 3812 5848